



Funktionsbeskrivning

SMS



Programversion 5.3.2 eller senare

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
1.1 Standardapp för SMS	4
2. Använda SMS	5
2.1. Konversationsvisning.....	5
2.2 Mappvisning	6
2.3 Skriva nytt meddelande	6
2.3.1 Skriva till en definierad kontakt.....	6
2.3.2 Skriva till nytt nummer	7
2.3.3 Skriva med smileys	8
2.3.4 Använda basmeddelanden.....	8
2.3.5 Bifoga bild i ett meddelande (MMS)	9
2.4 Ta emot nya meddelanden	10
2.5 Öppna meddelande	10
2.5.1 Svara på inkommet meddelande.....	11
2.5.2 Spara nummer som kontakt	12
2.5.3 Kopiera text	12
2.5.4 Visa länkar.....	12
2.6 Mapper i SMS-menyn.....	14
2.6.1 SMS-menyn.....	14
2.6.2 Olästa meddelanden	14
2.6.3 Inkomna meddelanden.....	14
2.6.4 Skickade meddelanden	15
2.6.5 Utkast	16
2.7 Bild-SMS.....	16
2.7.1 Skriva bild-SMS.....	17
2.7.2 Skicka bild-SMS	17
2.7.3 Läsa bild-SMS.....	18
2.8 Använda Smileys	19
3 Inställningar	20
3.1 Meddelandeställningar.....	20
3.1.1 Visning	20
3.1.2 Standardapp för SMS.....	21
3.1.3 Avisering	21
3.1.4 Visa meddelandets innehåll i aviseringsvyn	21
3.2 Skriv meddelande	22
3.2.1 Använd basmeddelanden.....	22
3.2.2 Skriv med bilder (Bild-SMS)	22

3.2.3 Långa SMS.....	22
3.2.4 Extra bekräftelse innan meddelande skickas	23
3.2.5 Nytt nummer	23
3.3 Läsa meddelande	23
3.3.1 Visa länkar.....	23
3.3.2 Läsa med bilder (Bild-SMS).....	23
3.4 Basmeddelanden.....	24
3.4.1 Nytt basmeddelande	24
3.4.2 Ändra basmeddelande	24
3.4.3 Ta bort basmeddelande	24
3.4.4 Flytta basmeddelande uppåt/nedåt	24
3.5 Rensa SMS	25

1. Inledning

Via funktionen *SMS* kan man skriva och ta emot meddelanden. Den stora fördelen gentemot en vanlig mobiltelefon är att man kan få talstöd både när man skriver egen text och när man läser mottagna meddelanden. Dessutom kan man få hjälp i skrivandet genom att använda s k *basmeddelanden*, dvs meddelanden som skrivits i förväg.

Det är möjligt att göra inställningar för *Bild-SMS*: Man kan ställa in om man vill skriva och/eller läsa SMS med bilder. Man kan alltså skriva SMS med bilder, men ta emot SMS med text och då få dem upplästa med hjälp av talsyntes.

Även MMS-meddelanden kan hanteras via *SMS*. Om apparaten har Android-version 4.4 eller högre kan man både skicka och läsa MMS-meddelanden. Om apparaten har lägre Android-version än 4.4 kan man endast läsa MMS-meddelanden. Man får då använda Handi-funktionen Album för att skicka (dela) bilder, se *Bruksanvisning Album*.

För bästa förståelse av funktionen *SMS* rekommenderas kännedom om Handi-funktionen *Kontakter*, se *Bruksanvisning Kontakter*.

1.1 Standardapp för SMS



Gäller endast fr o m Android-version 4.4.

För att kunna skicka SMS från apparater med Android-version som är v4.4 och högre måste man först välja vilken SMS-app som ska vara standard. Detta kan göras på tre sätt.

1. Första gången man skickar meddelande.

2. I Inställningar.

3. I konfigurationen.

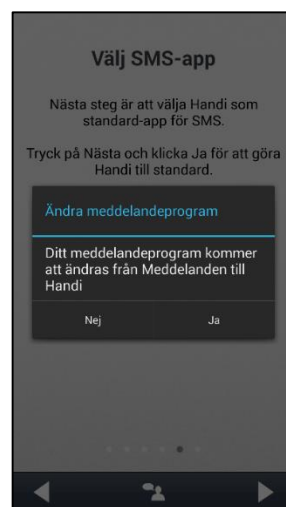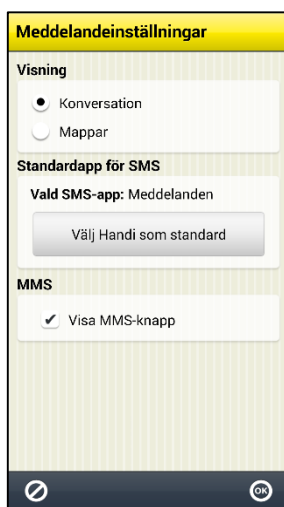


Alternativ 2 beskrivs i kapitel 3.1 *Meddelandeställningar*. Alternativ 3 beskrivs i *Handboken*.

2. Använda SMS

Visningen av meddelanden kan ställas in i två olika lägen: *Konversation* eller *Mappar*. Konversationsvisning innebär att man kan se alla skickade och mottagna meddelanden till en viss mottagare i samma "tråd". Mappvisning innebär att samtliga meddelanden är uppdelade i mapparna *Olästa*, *Inkomna*, *Skickade* och *Utkast*.

2.1. Konversationsvisning

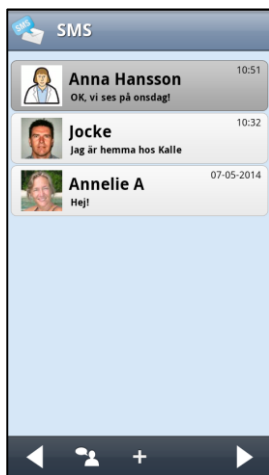

När man startar SMS med konversationsvisning visas en lista med alla konversationer, sorterade så att konversationen med det senast skickade eller mottagna meddelandet visas överst.

För att öppna en konversation trycker man på den så att den blir markerad och trycker sedan på *Nästa*. Se beskrivning av konversationsvyn nedan.

En markerad konversation kan läsas upp genom att man trycker på *Talstöd*-knappen . (Förutsatt att inställningen "Talstöd i menyer" är vald.)

För att skriva ett helt nytt meddelande trycker man på  se 2.3 *Skriva nytt meddelande*.

I den öppnade konversationen visas skickade meddelanden till höger och mottagna meddelanden till vänster. Det senaste meddelandet visas längst ned.

När man trycker på ett meddelande blir det gråmarkerat. Det kan då läsas upp genom att man trycker på *Talstöd*-knappen . (Förutsatt att inställningen "Talstöd i menyer" är vald.)

För att skriva ett nytt meddelande i samma konversation trycker man på , se 2.3 *Skriva nytt meddelande*.




Om man fått en mottagen bild (MMS) kan man spara bilden i mappen Mottaget genom att trycka på *Spara*-knappen  (visas då ett mottaget meddelande med bild är markerat).

Man trycker på *Ta bort*-knappen  för att radera ett markerat meddelande.

Om man fått ett meddelande från ett okänt nummer (finns ej sparad i kontakter) visas en *Spara kontakt*-knapp  i knappraden. När man trycker på den visas vyn "Ny kontakt" med mobilnumret ifyllt och man kan skriva in kontaktens namn mm, se 2.5.2 *Spara nummer som kontakt*.

2.2 Mappvisning

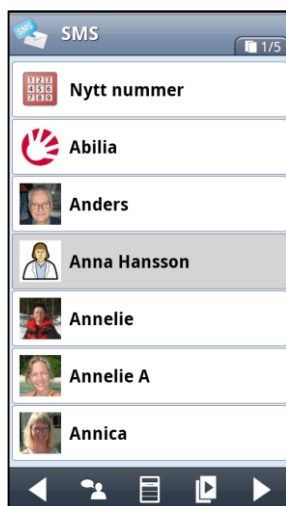

När man startar SMS med mappvisning visas användarens kontaktlista plus ikonen "Nytt nummer".

Kontakter och mappar visas i den ordning som definierats i Handi-funktionen *Kontakter*.

När man trycker på en kontakt eller mapp blir den gråmarkerad. Namnet på kontakten/mappen kan då läsas upp genom att trycka på *Talstöd*-knappen . (Förutsatt att inställningen "Talstöd i menyer" är gjord.)

För att skicka SMS till en kontakt markerar man den och trycker på *Nästa*, se 2.3 *Skriva nytt meddelande*.



Genom att trycka på *Meny*-knappen  kan man komma till olästa, inkomna, skickade och ej skickade meddelanden (utkast). Se kapitel 2.6 *Mappar i SMS-menyn*.

2.3 Skriva nytt meddelande

För att skriva ett nytt meddelande vid mappvisning (se 2.2 *Mappvisning*) väljer man önskad kontakt/nytt nummer och trycker på *Nästa*.

För att skriva ett nytt meddelande vid konversationsvisning (se 2.1. *Konversationsvisning*), trycker man på  och får då välja kontakt/nytt nummer.

2.3.1 Skriva till en definierad kontakt

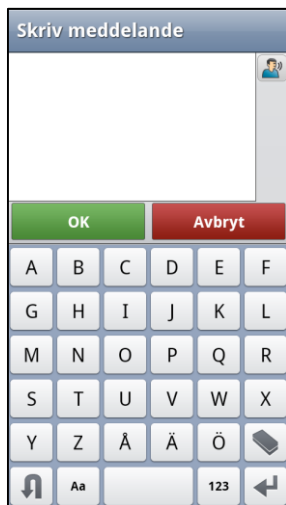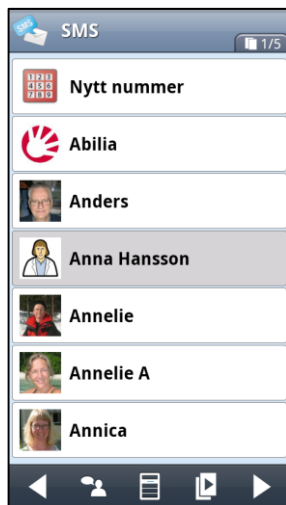

För att skriva till en definierad kontakt väljer man önskad kontakt i kontaktlistan och trycker på *Nästa*.

I nästa vy skriver man in texten. Man kan få meddelandet uppläst via *Talstöd*-knappen (om så är inställt). När texten är klar trycker man på *OK* för att gå vidare.

I vyn "Skicka meddelande?" trycker man på *OK* för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas och man får information om det gick iväg eller inte.

Om meddelandet inte kunde skickas visas ett felmeddelande.

Vid mappvisning läggs meddelandet i mappen *Utkast* som man kommer till via SMS-menyn, se kapitel 2.6.5 *Utkast*.


Vid konversationsvisning läggs meddelandet som ett utkast i konversationen.

Man kan sedan göra ett nytt försök att skicka det senare.



2.3.2 Skriva till nytt nummer

Man kan välja om det ska vara möjligt att skicka meddelande till andra än de personer som är sparade i kontaktlistan. Om man bara ska kunna skicka meddelanden till personer i kontaktlistan kan "Nytt nummer" tas bort, se 3.2.5 *Nytt nummer*.

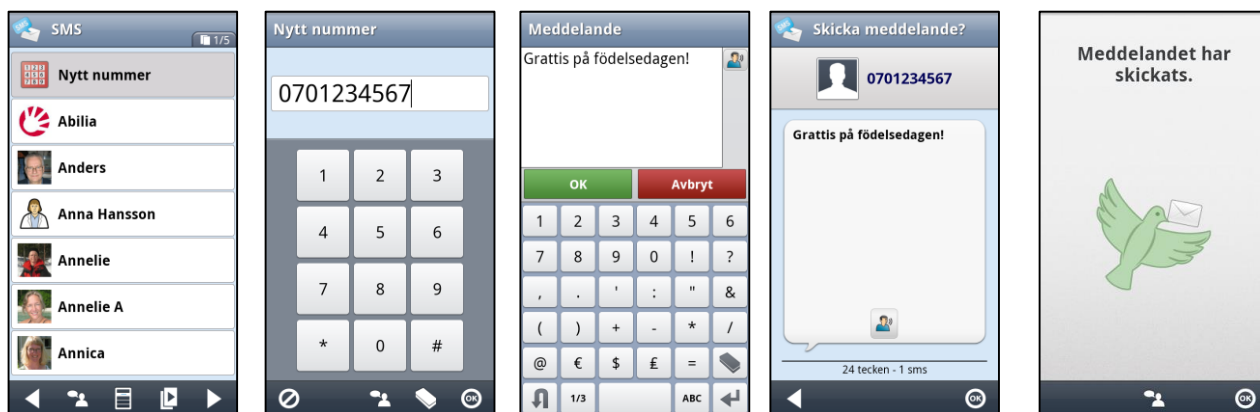


För att skriva till ett nytt nummer väljer man "Nytt nummer" i kontaktlistan och trycker på *Nästa*. Nu får man skriva in numret och sedan trycka på *OK*.

I nästa vy skriver man in texten. Man kan få meddelandet uppläst via *Talstöd*-knappen (om så är inställt). När texten är klar trycker man på *OK* för att gå vidare.

I vyn "Skicka meddelande?" trycker man på *OK* för att skicka meddelandet. Meddelandet skickas och man får information om det gick iväg eller inte.

2.3.3 Skriva med smileys

Man kan skriva med smileys via smiley-tangentbordet, sida 3/3 i det numeriska tangentbordet. Se kapitel 2.8 *Använda Smileys* för beskrivning av smileys.

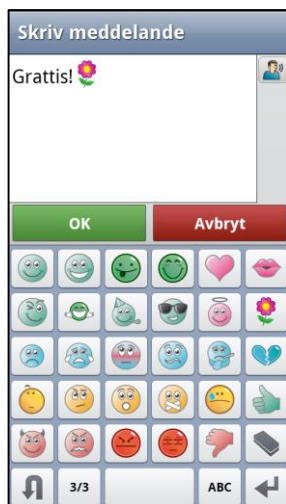

När man t ex väljer smiley-symbolen "blomma", visas dess bild i textfältet. När man trycker på *Talstöd*-knappen läses ordet "blomma" upp.

För att byta till Smiley-tangentbord ska man först trycka på 123 för att komma till det numeriska tangentbordet, och sedan trycka på knappen 1/3 tills man kommer till sida 3/3 med Smileys.

Man trycker på knappen ABC för att komma till bokstavstangentbordet.

OBS! För att kunna skriva SMS med Smileys måste "Aktivera smileys i tangentbordet" vara valt i **Inställningar|Tangentbord**.

2.3.4 Använda basmeddelanden

För att göra det ännu enklare och snabbare att skriva ett meddelande kan man använda s k *basmeddelanden*, dvs meddelanden som har skrivits i förväg.



Man väljer önskat basmeddelande och går sedan vidare med *Nästa*. (Om man vill skriva ett nytt meddelande utan basmeddelande väljer man "Inget".) Hur man skapar basmeddelanden beskrivs i kapitel 3.4 *Basmeddelanden*.

Texten kan redigeras i vyn "Skicka meddelande?" genom att man trycker på  och då får upp tangentbordet. Det går alltså att ha "halvfärdiga" basmeddelanden, t ex "Jag är hemma hos ", och skriva färdigt dem först när de ska skickas. Se exemplet nedan.



Välj basmeddelande

Tryck på Ändra

Bas-meddelandet visas



Skriv klart meddelandet

Meddelandet visas, tryck på OK för att skicka

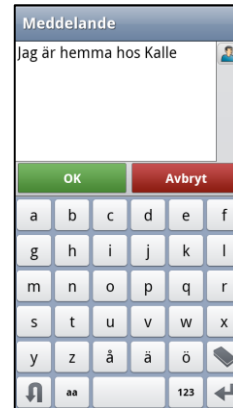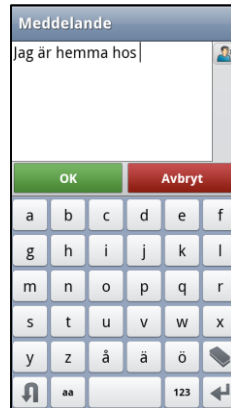

2.3.5 Bifoga bild i ett meddelande (MMS)

Gäller endast fr o m Android-version 4.4.

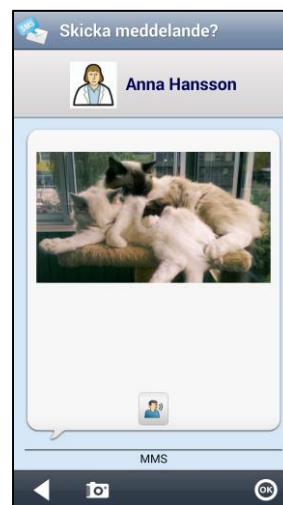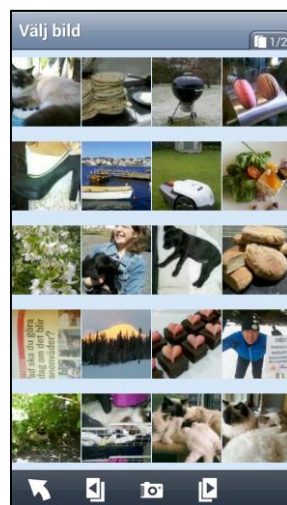

Man trycker på  och väljer en befintlig bild eller tar en ny bild med kameran. Sedan skickar man meddelandet som vanligt.

2.4 Ta emot nya meddelanden

När Handi tar emot ett meddelande visas en avisering om nya inkomna meddelanden. Om man har ett nytt meddelande visas kontakten eller numret i aviseringen. Om man har flera nya meddelanden visas antalet meddelanden.




Man kan göra inställningar för hur aviseringen ska visas och om meddelandets innehåll ska visas i aviseringen, se 3.1 *Meddelandeinställningar*.

Ett nytt meddelande från känd kontakt

Ett nytt meddelande från ej definierad kontakt

Flera nya meddelanden

Meddelandets textinnehåll visas i aviseringen

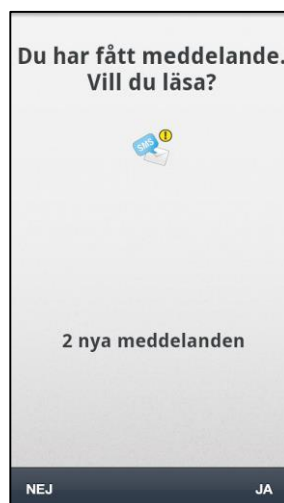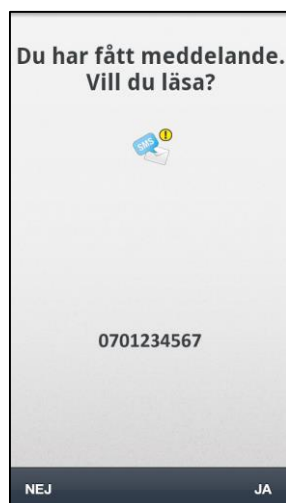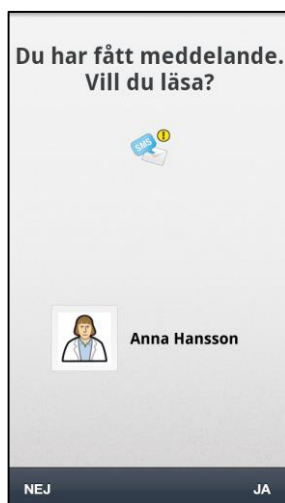

Om man trycker på **JA** när man har ett nytt meddelande visas meddelandet och man kan få det uppläst. Om man trycker på **JA** när man har flera nya meddelanden kommer man till antingen 2.6.2 *Olästa meddelanden* (om mappvisning) eller konversationslistan.

Om man trycker på **NEJ** visas den funktion där man var innan. Då kan man välja att titta på olästa meddelanden senare.

2.5 Öppna meddelande


Funktionerna i detta kapitel gäller endast för mappvisning.

I meddelandevyn visas meddelandet och den tid det skickades.

När man trycker på *Ta/stöd*-knappen läses meddelandet upp av talsyntesen.

När man trycker på *Nästa* kan man svara på meddelandet, se nedan.

För att ta bort meddelandet trycker man på *Ta bort*-knappen .

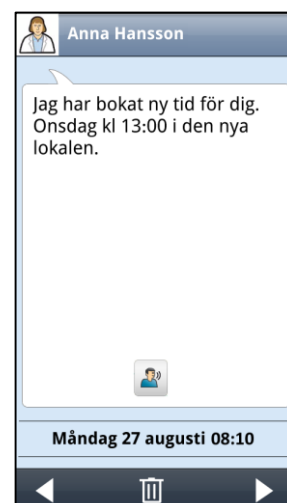

För att se en bifogad bild i fullskärm trycker man på den.

För att spara bilden i mappen Mottaget trycker man på knappen .



2.5.1 Svara på inkommet meddelande



Genom att trycka på *Nästa* i meddelandevyn kan man svara på ett inkommet meddelande:

Tryck på Nästa för att svara på meddelandet

Tryck på JA för att svara på meddelandet


Skriv önskad text

Mottagare och meddelande visas, tryck OK för att skicka

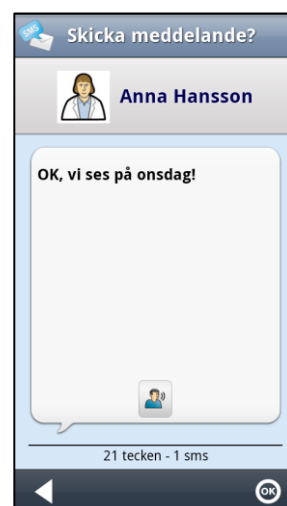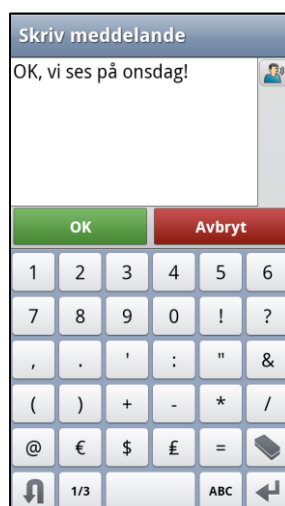


Om man svarar *NEJ* i vyn "Vill du svara på meddelandet?" ovan kommer man tillbaka till inkomna-vyn.

2.5.2 Spara nummer som kontakt

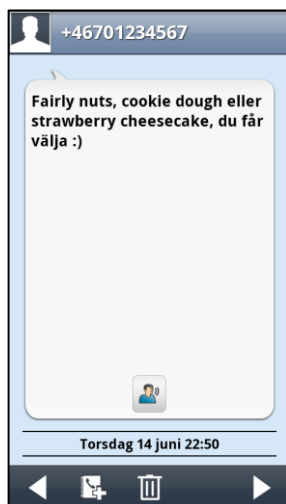

Om meddelandet kommer från ett okänt nummer (finns ej sparat i Kontakter) visas en *Spara kontakt*-knapp  i knappraden. När man trycker på den visas vyn "Ny kontakt" med mobilnumret ifyllt och man kan skriva in kontaktens namn mm.

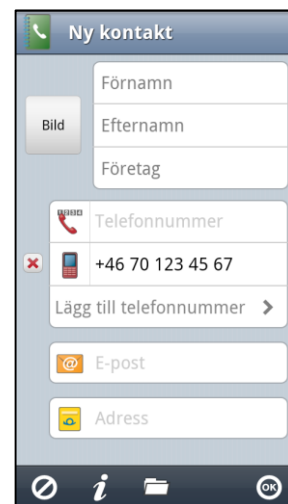

2.5.3 Kopiera text

Man kan kopiera text från ett inkommet meddelande till ett annat textfält i Handi. T ex om man har fått en vägbeskrivning i ett SMS så kan man kopiera den till en anteckning som är kopplad till en aktivitet i Kalendern (se *Kalender Bruksanvisning*).



Kopiera texten i meddelandet genom att trycka och hålla på texten tills en meny visas. Välj *Kopiera all text*. Därefter kan texten klistras in i t ex en anteckning. Gå till tangentbordet där texten ska klistras in. Tryck och håll ned i textfältet på tangentbordet (nära textmarkören) tills en meny visas, och välj *Klistra in*.

2.5.4 Visa länkar


Om ett mottaget meddelande innehåller ett telefonnummer, webadress, e-postadress eller kartlänk så visas det som en "länk" med understruken blå text i meddelandet. När man trycker på länken kommer man vidare till en annan funktion, se nedan.

Det är inställbart om länkar ska visas i meddelanden, se 3.3.1 *Visa länkar*.

Om man trycker på en länk till ett telefonnummer kommer man till Androids *Uppringaren*, och man kan ringa till numret i den mottagna länken.

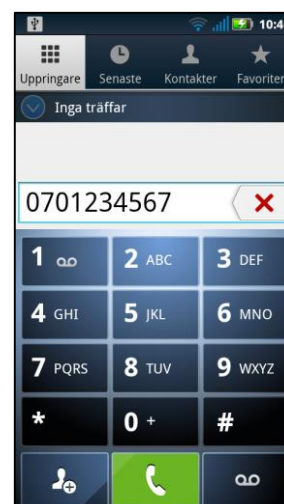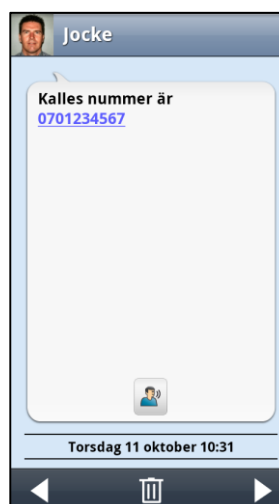

Om man trycker på en länk till en webbadress öppnas webbläsaren med den aktuella sidan.

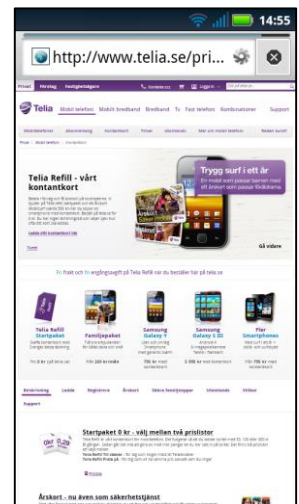


Om man trycker på en länk till en e-postadress kommer man till den valda e-post funktionen.

Om man inte tidigare har valt standard får man göra det först. För att kunna skicka e-post måste det finnas ett e-post konto, se *Handboken*.



Om man trycker på en länk till en kartposition kommer man till den valda kartapplikationen.

Om man inte tidigare har valt standard får man göra det först.

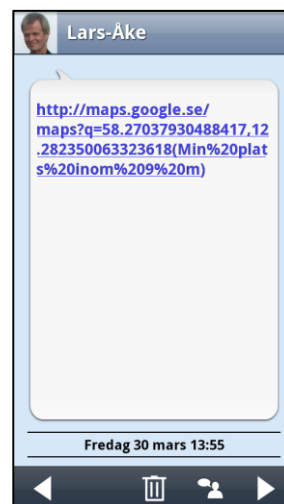

2.6 Mapper i SMS-menyn

Funktionerna i detta kapitel gäller endast för mappvisning.


2.6.1 SMS-menyn

Genom att trycka på Meny-knappen  kommer man till SMS-menyn.

Här kan man se olästa, inkomna, skickade och ej skickade meddelanden (utkast).

På raden för *Olästa* visas antalet olästa meddelanden inom parentes.

Funktionerna beskrivs nedan.

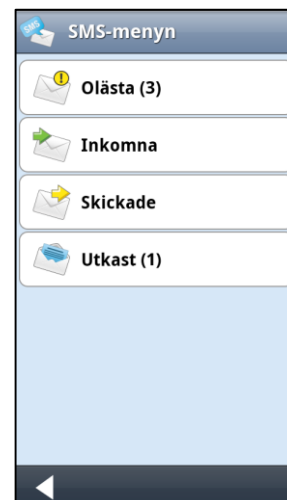

2.6.2 Olästa meddelanden



I Olästa-vyn visas alla olästa meddelanden i kronologisk ordning med det nyaste meddelandet först. (De visas även i Inkomna.)

I rubriken anges antalet olästa meddelanden inom parentes.

Om meddelandet kommer från en känd kontakt visas namnet och ev bild. Om kontakten är okänd visas numret.

De meddelanden som är olästa är märkta med .

Om ett meddelande med bifogad bild (MMS) har mottagits, visas en symbol  i fältet för meddelandet.

2.6.3 Inkomna meddelanden



I Inkomna-vyn visas inkomna meddelanden i kronologisk ordning med det senast inkomna meddelandet överst.


De meddelanden som är olästa är märkta med . Olästa meddelanden finns även i *Olästa*, se 2.6.2 *Olästa meddelanden*.

Om meddelandet kommer från en känd kontakt visas namnet och ev bild. Om avsändaren är okänd visas numret.

När ett meddelande är markerat kan man få det som visas i listan uppläst genom att trycka på *Talstöd*-knappen (om inställningen är vald).

När ett meddelande är markerat kan man ta bort det genom att trycka på *Ta bort*-knappen.

2.6.4 Skickade meddelanden

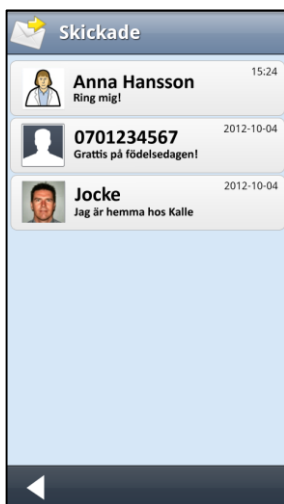

I Skickade-vyn visas skickade meddelanden i kronologisk ordning med det senast skickade meddelandet överst.

Om meddelandet är skickat till en känd kontakt visas namnet och ev bild. Om mottagaren inte finns i Kontakter visas numret.

För att öppna det skickade meddelandet ska man markera det och trycka på *Nästa*.


När ett meddelande är markerat kan man få det som visas i listan uppläst genom att trycka på *Talstöd*-knappen (om inställningen är vald).

När ett meddelande är markerat kan man ta bort det genom att trycka på *Ta bort*-knappen.

För att skicka meddelandet igen till en annan person trycker man på *Nästa*, se nedan.

2.6.4.1 Vidarebefordra meddelande

Om man vill vidarebefordra ett redan skickat meddelande får man börja med att öppna det, se kapitel 2.6.4 *Skickade meddelanden* ovan. När man trycker på *Nästa* visas frågan "Vill du skicka meddelandet igen?".

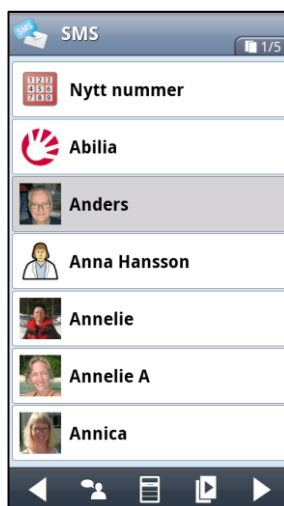

Om man svarar *JA* kommer man vidare till vyn "Välj kontakt". Här får man bestämma vem meddelandet ska skickas till. När man har valt mottagare klickar man på *Nästa*, och sedan på *OK* i vyn "Skicka meddelande". Meddelandet skickas nu.

2.6.5 Utkast

I Utkast finns meddelanden som inte har kunnat skickas av olika skäl. För att se dessa meddelanden går man till SMS-menyn och väljer *Utkast*.



Meddelandena visas i kronologisk ordning, med det nyast skrivna meddelandet först. Man öppnar det meddelande man vill skicka genom att markera det och trycka på *Nästa*. Meddelandet visas i samma vy som i 2.3 *Skriva nytt meddelande*.

När man trycker på *OK* skickas meddelandet. Man får en bekräftelse på om meddelandet kunde skickas eller inte.

2.7 Bild-SMS

Bild-SMS är en inställning som gör att man kan skriva och läsa SMS med bilder, se 3.2.2 *Skriv med bilder (Bild-SMS)*.

Bild-SMS bygger på att den som vill skicka eller ta emot bildmeddelande har aktuella symboler i sin Handi. Det som skickas och tas emot är alltid vanliga textmeddelanden.

Detta medför att bild-SMS kan skickas till vilken mobiltelefon som helst och där visas som ett vanligt textmeddelande. Det innebär också att man kan hantera olika symbolsystem. En symbol kan skickas som en PCS-bild men visas som Pictogram i mottagarens Handi.

Exempel:

När man skriver bildmeddelandet   är det alltså textmeddelandet "laga mat hemma" som skickas, eftersom den första bilden heter "laga mat" och den andra bilden heter "hemma".

När meddelandet skickas till en *vanlig mobiltelefon* visas "laga mat hemma" i mottagarens telefon.

När meddelandet skickas till en *Handi med Pictogrambilder* där visas  .

När meddelandet skickas till en *Handi med PCS-bilder* visas  .

Man kan välja om man vill skriva och/eller läsa SMS med bilder. Genom att *skriva* SMS med bilder men *läsa* SMS med text – som tolkas med hjälp av talsyntes – ges ett bra stöd för personer med kommunikationssvårigheter.

När man skriver använder man bilder från bildarkivet.

2.7.1 Skriva bild-SMS

Om inställningen är "Skriv med bilder (Bild-SMS)" visas ett bildtangentbord när man skriver SMS. Tangentbordet har ett *bildläge* och ett *textläge*.

Bildläge

Här visas bilderna från bildarkivet.

När man har tryckt på en bild visas den i textrutan överst.


Man bläddrar mellan bilderna genom att trycka på *Bläddra-*

knapparna  .

Man tar bort bilder genom att trycka på *Sudda*-knappen .

För att skriva med bokstäver trycker man på *Text*-knappen  och ställer därmed in textläget, se nedan. (Det är inställbart om *Text*-knappen ska visas, se 3.2.2 *Skriv med bilder (Bild-SMS)*.)

Man trycker på *Nästa* för att gå vidare till 2.7.2 *Skicka bild-SMS*.

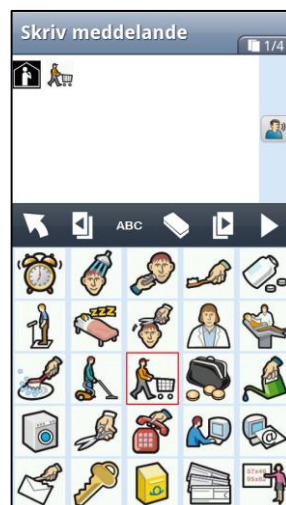


Textläge


Här skriver man med bokstäver och siffror på vanligt sätt.

Man trycker på *Bild*-knappen  för att komma tillbaka till bildläget.

Man trycker på *Nästa* för att gå vidare till 2.7.2 *Skicka bild-SMS*.

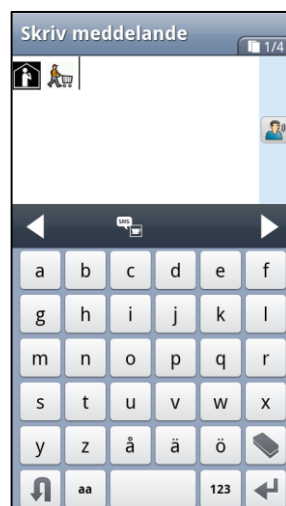

2.7.2 Skicka bild-SMS

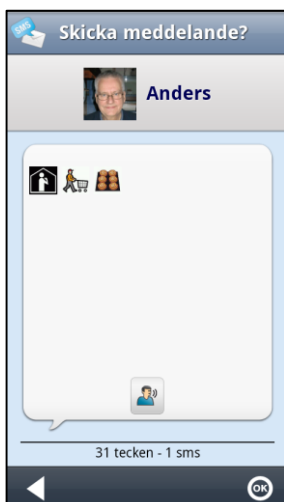


Meddelandet visas med bilder och ev text i denna vy. Det skickas som ett vanligt textmeddelande när man trycker på *OK*.

För övrig funktionalitet, se 2.3 *Skriva nytt meddelande*.

2.7.3 Läsa bild-SMS

Om inställningen är "Läs med bilder (Bild-SMS)" kan bilder visas i meddelandet.

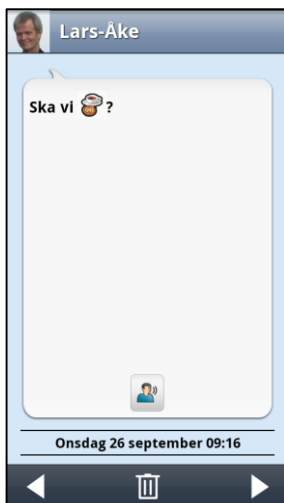

Om det finns en bild i bildarkivet som exakt motsvarar ett ord i meddelandet visas bilden istället för ordet.

För övrig funktionalitet, se [2.6.2 Olästa meddelanden](#).

2.8 Använda Smileys

Man kan använda smileys i SMS.

Smileys är symboler som används i SMS, mail, chatt etc för att uttrycka olika slags känslor. Man "ritar" smileys med hjälp av tecken på tangentbordet, t ex :) betyder "glad". För att se vad symbolen föreställer får man betrakta den med huvudet lutande i 90 graders vinkel åt vänster.

I Handi kan man "rita" de vanligaste smilisarna via tangentbordets 123-läge. Enklast är dock att välja dem via Smiley-tangentbordet (sidan 3/3 i det numeriska tangentbordet), se 2.3.3 *Skriva med smileys*.

Smiley-symbolerna i Handi är ordnade i ett färgsystem:

Grön	Glad, positiv känsla
Rosa	Kärleksfull känsla
Orange	Neutral känsla
Blå	Ledsen, negativ känsla
Röd	Arg, negativ känsla

De olika Smiley-symbolerna visas nedan.


Symbol	Kod	Ord
	: -)	glad
	: -D	skrattar
	: -P	lipar
	(giggle)	fnittrar
	; -)	blinkar
	(clap)	klappar händerna
	<: o)	fira
	B -)	cool
	(y)	okej
	(n)	nej

Symbol	Kod	Ord
	<3	hjärta
	: -*	puss
	O: -)	ängel
	(f)	blomma
	: -(	ledsen
	: '(	gråter
	: -(	generad
	o _O	förvirrad
	+ (	sjuk
	(u)	brustet hjärta

Symbol	Kod	Ord
	: -?	funderar
	: -\	skeptisk
	= -O	förvånad
	: -X	hemlis
	(:	svettas
	>: -)	djävul
	X- (	arg
	(envy)	avundsjuk
	= (	tråkigt

3 Inställningar

För att göra inställningar för SMS ska man gå till *Inställningar*. För att komma till *Inställningar* trycker man knappkombinationen, se *Handboken*.

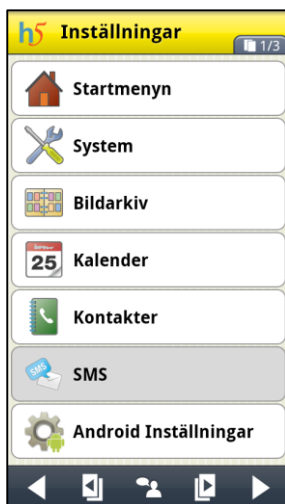

För att komma till inställningarna för SMS väljer man SMS på sida 1.

En meny visas, se vyn till höger.

Nedan beskrivs de olika inställningsfunktionerna.



3.1 Meddelandeinställningar

I **Inställningar|SMS|Meddelandeinställningar** anger man om det ska vara konversations- eller mappvisning och hur meddelanden ska aviseras. Beroende på vilken Android-version enheten har visas olika inställningsval i denna vy.

*Android-version
lägre än 4.4*




Här kan man göra följande inställningar:

- Visning (Konversation eller Mappar)
- Standardapp för SMS (fr o m Android-version 4.4)
- Avisering (av/på, ljudsignal, vibration, visa meddelandets innehåll i aviseringsvyn)
- Visa MMS-knapp (fr o m Android-version 4.4)

De olika inställningarna beskrivs nedan.

*Android-version
4.4 eller högre*

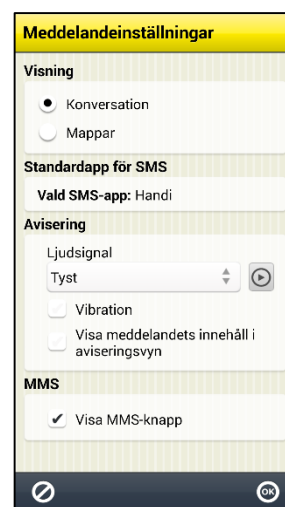

3.1.1 Visning


Visningen av meddelanden kan ställas in i två olika lägen: *Konversation* eller *Mappar*. Konversationsvisning innebär att man kan se alla skickade och mottagna meddelanden till en viss mottagare i samma "tråd". Mappvisning innebär att samtliga meddelanden är uppdelade i mapparna Olästa, Inkomna, Skickade och Utkast. Se 2.1. *Konversationsvisning resp 2.2 Mappvisning*.

3.1.2 Standardapp för SMS

Gäller endast fr o m Android-version 4.4.

När Handi inte är vald som standardapp för SMS kan man ställa in det här genom att trycka på knappen "Välj Handi som standard".

Via **Android-inställningar|Standardprogram|Meddelande** ändrar man till en annan standardapp än Handi. (Kan vara olika mellan apparater.)

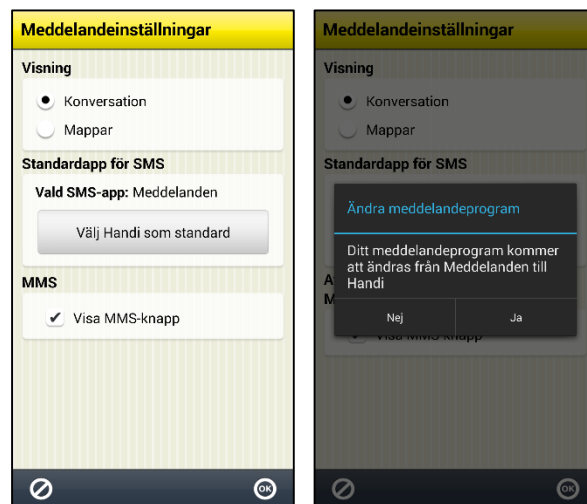

3.1.3 Avisering

Avisering Av/På gäller endast Android-version lägre än 4.4. Om man väljer att stänga av aviseringen kommer inte vyn "Du har fått meddelande" att visas. Då kommer aviseringen att tas om hand av den inbyggda SMS-appen. Man kan dock läsa och skriva meddelanden i Handi-SMS ändå.

När Handi är standardapp för SMS kan man göra inställningar av aviseringens ljudsignal och vibration.

3.1.4 Visa meddelandets innehåll i aviseringsvyn

När "Visa meddelandets innehåll i aviseringsvyn" är valt visas textinnehållet i inkommet meddelande enligt den vänstra bilden. Annars visas aviseringsvyn enligt den högra bilden.



3.2 Skriv meddelande



I **Inställningar**|**SMS**|**Skriv meddelande** kan man göra följande inställningar:

- Använd basmeddelanden
- Skriv med bilder (Bild-SMS)
- Långa SMS
- Extra bekräftelse innan meddelande skickas
- Nytt nummer

De olika inställningarna beskrivs nedan.

3.2.1 Använd basmeddelanden

När "Använd basmeddelanden" är valt visas vyn "Välj basmeddelande" när man skriver ett nytt meddelande eller svarar på ett meddelande, se 2.3.4 *Använda basmeddelande*.

3.2.2 Skriv med bilder (Bild-SMS)

När "Skriv med bilder (Bild-SMS)" är valt visas bildtangentbordet när man skriver meddelandet, se 2.7.1 *Skriva bild-SMS*.

3.2.3 Långa SMS

När "Långa SMS" är valt kan man skriva SMS som är längre än 160 tecken. Antal tecken och SMS visas längst ner i vyn.



3.2.4 Extra bekräftelse innan meddelande skickas

När "Extra bekräftelse innan meddelande skickas" är valt visas vyn till höger som ett sista steg innan meddelandet skickas.


Denna inställning är till för de personer som trycker lite för snabbt på *Nästa*/OK och därför ofta skickar meddelanden oavsiktligt.



3.2.5 Nytt nummer

När "Nytt nummer" är valt visas Nytt nummer och man kan skicka meddelanden till andra än de personer som finns inlagda som Kontakter, se 2.3.2 *Skriva till nytt nummer*.

3.3 Läs meddelande

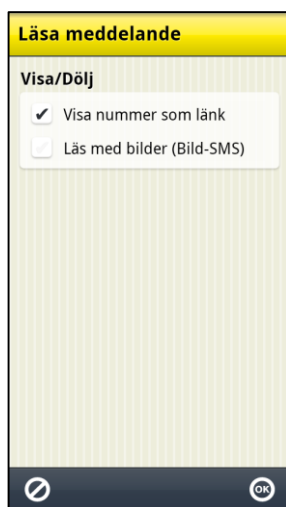

I **Inställningar**[SMS]**Läs meddelande** kan man göra följande inställningar:

- Visa länkar
- Läs med bilder (Bild-SMS)

De olika inställningarna beskrivs nedan.

3.3.1 Visa länkar

När "Visa länkar" är valt visas telefonnummer, webadress, e-postadress eller kartlänk i inkomna SMS som en länk. Man kan då trycka på länken och komma vidare till lämplig app. Se 2.5.4 *Visa länkar*.

3.3.2 Läs med bilder (Bild-SMS)

När "Läs med bilder (Bild-SMS)" är valt kan inkommande meddelanden visas med bilder, se 2.7.3 *Läs bild-SMS*.

3.4 Basmeddelanden



I **Inställningar|SMS|Basmeddelanden** definierar man basmeddelanden.

Här visas alla basmeddelanden och en övre knapprad med redigeringsfunktionerna *Ny*, *Ändra*, *Ta bort*, *Flytta uppåt* och *Flytta nedåt*. (Om inget basmeddelande är markerat visas bara knappen *Ny*.)



Hur man definierar basmeddelandena beskrivs nedan.

3.4.1 Nytt basmeddelande



För att skapa ett nytt basmeddelande trycker man på knappen Ny.

Basmeddelandet läggs då in via följande sekvens:

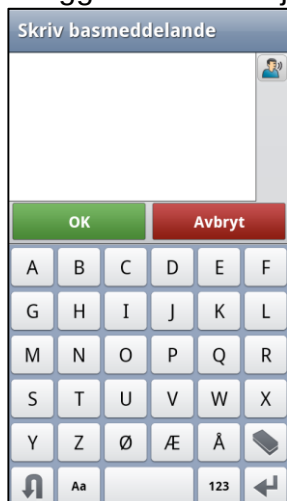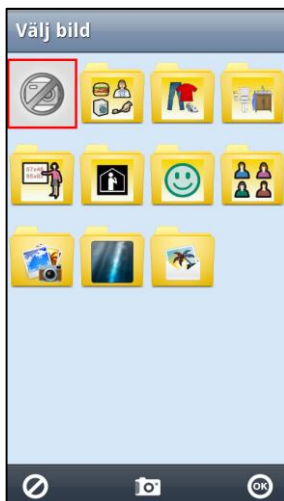

Först väljer man en symbol och sedan skriver man in texten för basmeddelandet.

Symbolen bifogas inte i meddelandet utan är bara en hjälp för användaren att hitta rätt basmeddelande.

3.4.2 Ändra basmeddelande



För att ändra ett basmeddelande markerar man det och trycker på knappen *Ändra*. Basmeddelandet ändras via samma vy som i *Nytt basmeddelande* ovan.

3.4.3 Ta bort basmeddelande



För att ta bort ett basmeddelande markerar man det och trycker på knappen *Ta bort*. Man får bekräfta att basmeddelandet ska tas bort.

3.4.4 Flytta basmeddelande uppåt/nedåt





För att flytta ett basmeddelande markerar man det och trycker på knapparna *Flytta uppåt* eller *Flytta nedåt*. Basmeddelandet flyttas då.



3.5 Rensa SMS

I **Inställningar**[SMS]**Rensa SMS** kan man ta bort meddelanden i mapparna *Inkomna*, *Skickade* och *Utkast*.

1. Välj önskad mapp.
2. Bocka för de SMS som ska raderas.
3. Bekräfta att valda SMS ska tas bort.

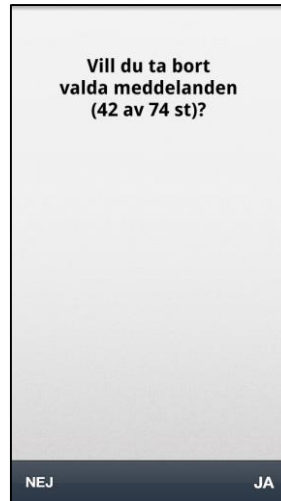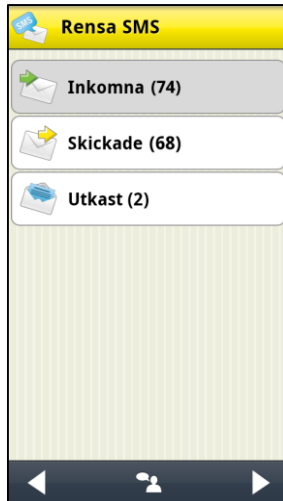

Om en mapp är tom är texten grå och den kan inte väljas.

I steg 2 kan man bocka för/av samtliga SMS via knappen .

När man trycker på **OK** får man bekräfta att valda SMS ska raderas.

